

Vorbereitung

Erstellen Sie eine Sicherheitskopie von Ihrem 3Shape


Da es bei jeglichem Import in ein 3Shape-System zu Abrissen kommen kann, empfehlen wir vor der Installation eine Rücksicherung Ihrer Daten als Backup vorzunehmen.

1. Wählen Sie Ihren „3Shape Configuration“-Ordner an. (Bei lokalen Installationen befindet sich dieser unter „C:/3Shape Configuration“. Bei Netzwerkinstallationen ist der Ordner im ControlPanel ersichtlich oder fragen Sie Ihren Netzwerk-Administrator nach dem Speicherort.)

2. Kopieren Sie Ihren Ordner „3Shape Configuration“:

- Rechtsklick auf den Ordner > „kopieren“
- Rechtsklick auf freie Fläche daneben > „einfügen“

Sie haben nun Ihre Sicherheitskopie erstellt.

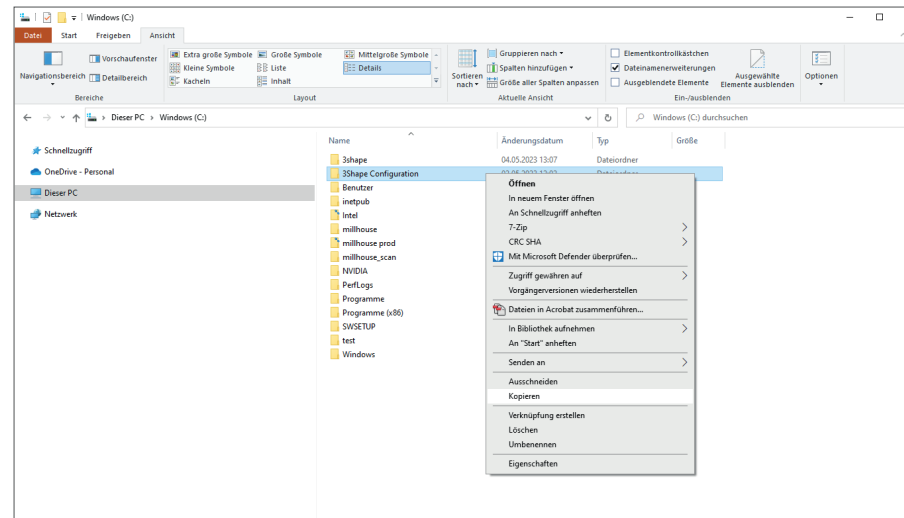

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass keine andere 3Shape-Software während der Installation ausgeführt wird. Sicherheitshalber empfehlen wir vor der Installation Ihren Computer neu zu starten.


Laden Sie das 3Shape-Update von der millhouse-Webseite herunter:
www.millhouse.de/downloads

2. Öffnen Sie Ihren Download-Ordner und entpacken Sie die heruntergeladene Datei.

>>> Passwort: millhouse3shape2023

Es entsteht ein neuer Ordner „2022_02“.

3. Führen Sie die Programmdatei („.exe“) „als Administrator“ aus.

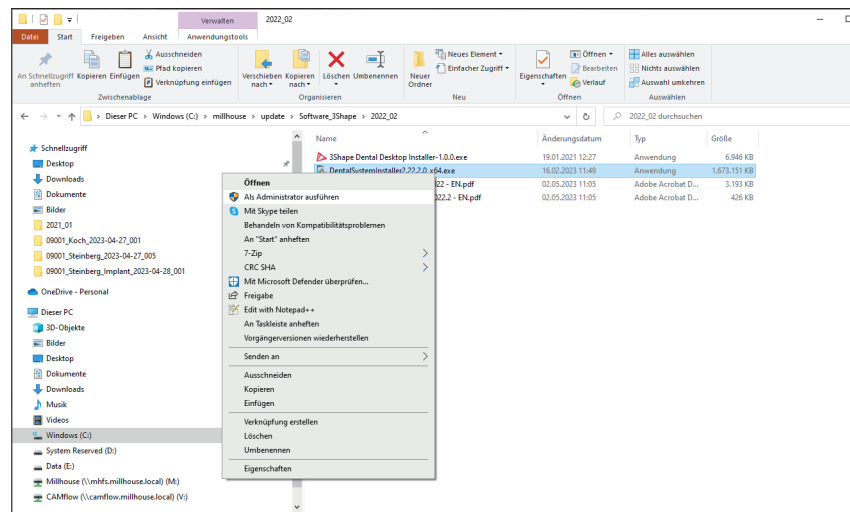


Lassen Sie alle programmseitig geforderten Änderungen zu und starten Sie die Installation, indem Sie durch „Ja“ bestätigen.

4. Der **3Shape Dental System Installer** wird ausgeführt. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus und klicken Sie auf „Weiter“.



5. Im nächsten Schritt wählen Sie „Benutzerdefiniertes Upgrade“ und kontrollieren Sie sicherheitshalber Ihre Spracheinstellungen. Klicken Sie auf „Weiter“.

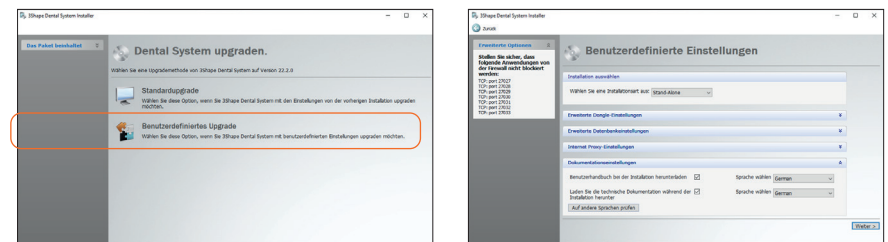


In den benutzerdefinierten Einstellungen führen Sie ein „schnelles Backup“ durch. Klicken Sie auf „Weiter“.

Daraufhin erfolgen die ersten automatischen Installationsschritte. Dieser Vorgang dauert mehrere Minuten.






6. In der sich anschließend öffnenden Übersicht „Download allgemeiner Materialien“ nehmen Sie bitte unten in der Liste das Häkchen bei „Send to Full Contour“ raus und wählen Sie „Importieren“.

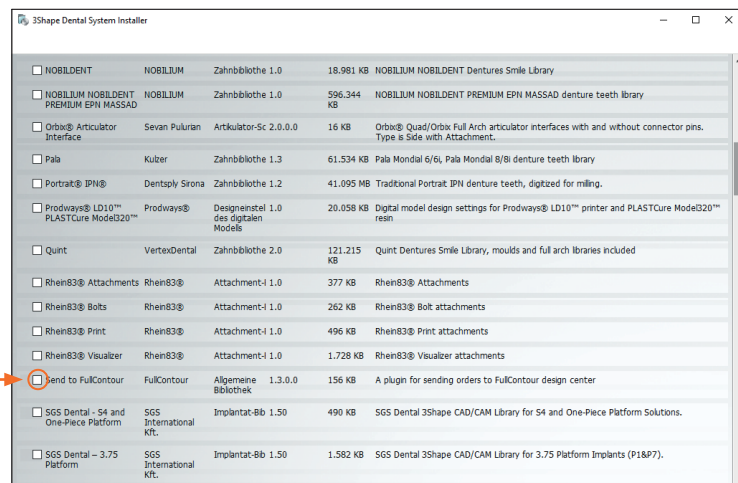


Das Upgrade von Dental System ist abgeschlossen.

7. Laden Sie nun den **3Shape Splint Designer** herunter, klicken Sie auf „Weiter“ und nach erfolgreicher Installation wählen Sie „Fertig stellen“.

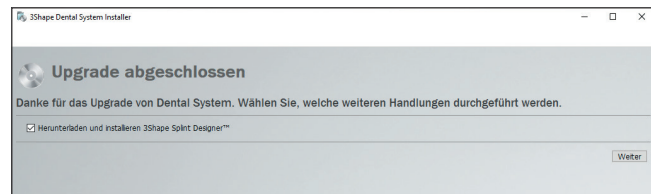

8. Bei älteren Versionen kann es vorkommen, dass Sie sich nach dem ersten Start der Software bei 3Shape registrieren müssen.
9. Öffnen Sie das **3Shape Dental System** und akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen.

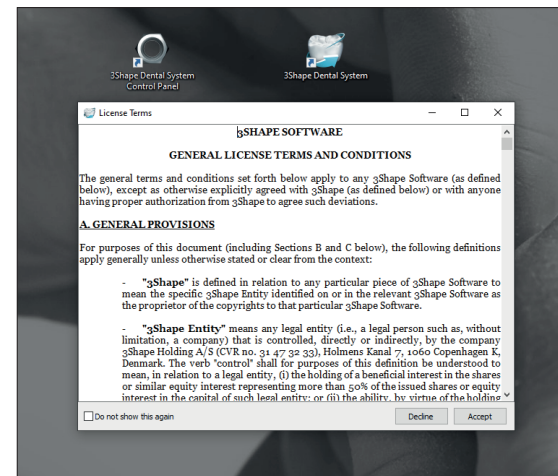

Die Installation war erfolgreich. Viel Spaß beim Designen!



Bei Fragen erreichen Sie unser **Support-Team** montags bis freitags von 9:00 – 17:00 Uhr unter

06122 520205