

Installation: Upgrade exocad DentalCAD® 3.3 Elefsina

Gültig ab Dezember 2024



1. Laden Sie das Upgrade exocad DentalCAD® 3.3 Elefsina von der millhouse-Webseite herunter: www.millhouse.de/downloads (Punkt 4: exocad DentalCAD)
2. Öffnen Sie Ihren Download-Ordner und entpacken Sie die heruntergeladene Datei, beispielsweise mithilfe des Programms „7-Zip“ (Installer in unserem Downloadbereich).
Passwort: millhouseelefsina2024

Es entsteht ein neuer Ordner „9036_Elefsina“.


3. Den Inhalt des neuen Ordners kopieren Sie über „Ausschneiden“ und „Einfügen“ unter C:\millhouse bzw. dem Speicherort Ihrer bisherigen exocad-Version.
4. a) Öffnen Sie den neuen Ordner und ändern Sie die Einstellungen unter 9036_Elefsina > DentalDB > config > settings-db.xml gemäß dem Inhalt Ihrer bisherigen exocad-Einstellungen unter „settings-db.xml“.
b) Installieren Sie das neueste Framework durch Doppelklick auf die „exocadFramework2024.exe“, und folgen Sie den Anweisungen.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2 <ApplicationSettingsDB>
3
4 <DataStoragePath>C:\millhouse_scan</DataStoragePath>
5 <FilenameTemplate>%d_%n-%s</FilenameTemplate>
6 <PathTemplate>%d_%n-%s</PathTemplate>
7
8
9 keys for FilenameTemplate and PathTemplate
10 %d: date
11 %n: practice number
12 %p: practice name
13 %f: patient first name
14 %l: patient last name
15 %c: country
16 %s: Schalennr
17 %fc: tooth color for whole job
18
19 This default setting is recommended by Exocad:
20 <PathTemplate>%d_%n-%s</PathTemplate>
21
```

5. Empfehlung

Zum schnellen Öffnen der Anwendung erstellen Sie eine Verknüpfung auf dem Desktop Ihres PCs:

- Öffnen Sie den Pfad „9036_Elefsina > DentalDB > bin“
- Rechtsklick auf die „DentalDB.exe“
- Senden an > Desktop (Verknüpfung erstellen):

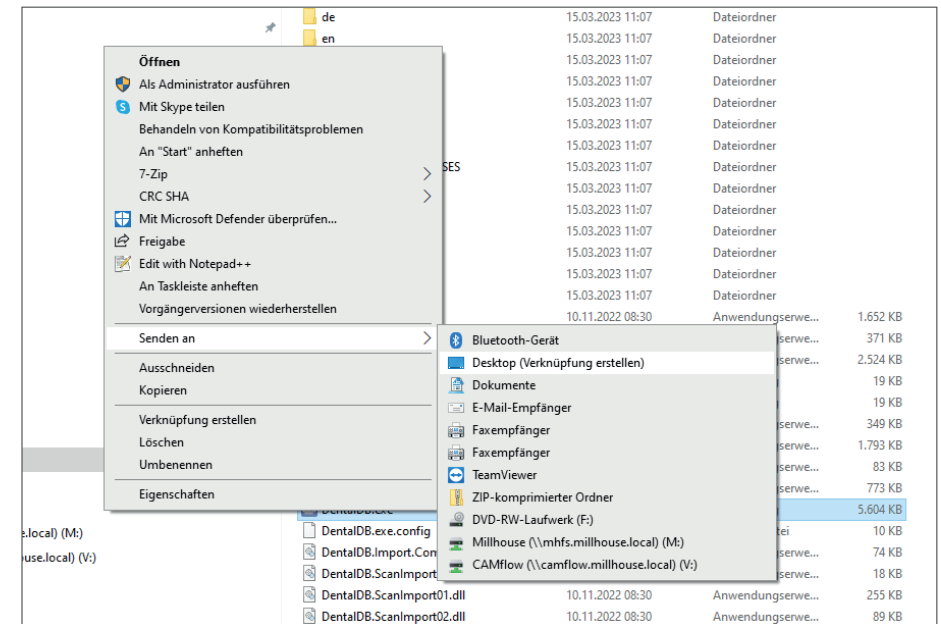

Die Installation war erfolgreich. Viel Spaß beim Designen!



Bei Fragen erreichen Sie unser **Support-Team** montags bis freitags von 9:00–17:00 Uhr unter

06122 520205