

# Installation: Upgrade exocad DentalCAD® 3.2 Elefsina

Gültig ab 15. Januar 2024



1. Laden Sie das Upgrade exocad DentalCAD® 3.2 Elefsina von der millhouse-Webseite herunter: [www.millhouse.de/downloads](http://www.millhouse.de/downloads) (Punkt 4: exocad DentalCAD)

2. Öffnen Sie Ihren Download-Ordner und entpacken Sie die heruntergeladene Datei.

Passwort: millhouseelefsina2024

Es entsteht ein neuer Ordner „exocad\_8740“.

3. Den Inhalt des neuen Ordners kopieren Sie über „Ausschneiden“ und „Einfügen“ unter C:\millhouse bzw. dem Speicherort Ihrer bisherigen exocad-Version.


4. a) Öffnen Sie den neuen Ordner und ändern Sie die Einstellungen unter 8740\_Elefsina > DentalDB > config > settings-db.xml gemäß dem Inhalt Ihrer bisherigen exocad-Einstellungen unter „settings-db.xml“.  
b) Installieren Sie das neueste Framework durch Doppelklick auf die „exocadFramework2024.exe“, und folgen Sie den Anweisungen.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2 <ApplicationSettingsDB>
3
4 <DataStoragePath>C:\millhouse_scan</DataStoragePath>
5 <FilenameTemplate>%d_&n-%s</FilenameTemplate>
6 <PathTemplate>%d_&n-%s</PathTemplate>
7
8
9 keys for FilenameTemplate and PathTemplate
10 %d: date
11 %n: practice number
12 %p: practice name
13 %f: patient first name
14 %l: patient last name
15 %c: country
16 %s: Schallener
17 %tc: tooth color for whole job
18
19 This default setting is recommended by Exocad:
20 <PathTemplate>%d_&n-%s</PathTemplate>
21
```

## 5. Empfehlung

Zum schnellen Öffnen der Anwendung erstellen Sie eine Verknüpfung auf dem Desktop Ihres PCs:

- Öffnen Sie den Pfad „8740\_Elefsina > DentalDB > bin“
- Rechtsklick auf die „DentalDB.exe“
- Senden an > Desktop (Verknüpfung erstellen):

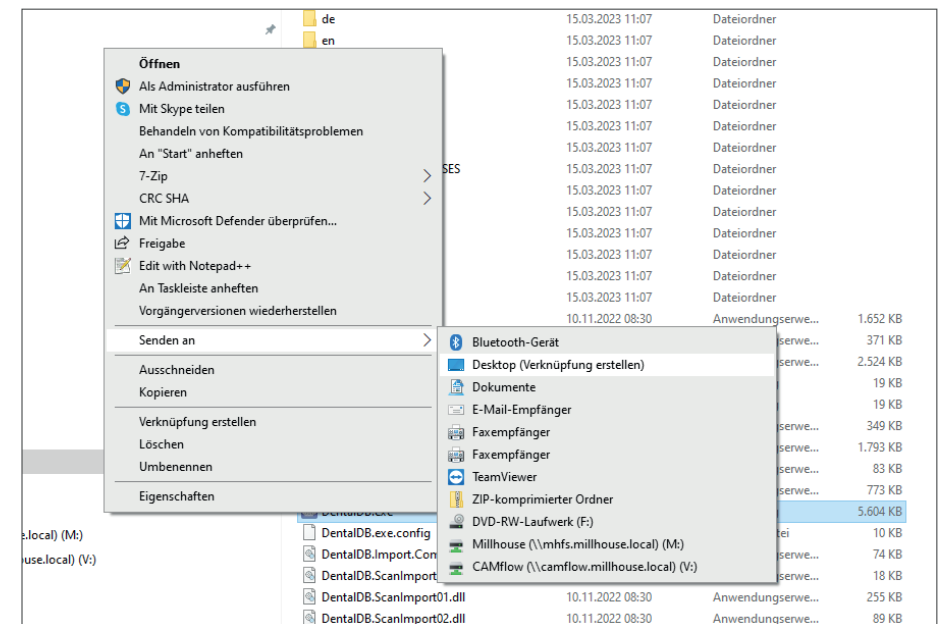

Die Installation war erfolgreich. Viel Spaß beim Designen!



Bei Fragen erreichen Sie unser **Support-Team** montags bis freitags von 9:00 – 17:00 Uhr unter

06122 520205